

Обратите внимание!

Во избежание повреждения стойки каркаса на кольцо-опору для ног нельзя вставлять.

Опорное кольцо является подставкой для ног во время сидения (чтобы избежать затекания ног). Для регулировки кольца-опоры по высоте необходимо открутить фиксатор, выставить нужную высоту и зафиксировать кольцо, закрутив фиксатор.

Правила по эксплуатации мебели

1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 "Мебель. Общие технические условия" и ГОСТ 19917 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия".
2. Мебель должна эксплуатироваться в сухих закрытых отапливаемых помещениях с температурой не ниже +10°C и не выше +35°C, и относительной влажностью 45 – 70%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделий, может измениться цвет поверхности.
4. Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
5. Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна.
6. Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями.

Уход за окрашенными и хромированными поверхностями

1. Хромированные и окрашенные порошковыми красками поверхности, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации.
2. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия.
3. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

Уход за кожаменителем

1. Рекомендуется регулярное удаление пыли с помощью пылесоса или щётки с мягким ворсом.
2. Кожаменитель не нуждается в обработке защитными средствами. Изготовитель за Вас уже это сделал.
3. Обычные очистительные химические средства могут повредить кожаменитель.
4. Время от времени кожаменитель следует протирать влажной тканью или губкой.
5. Пятна следует удалять сразу же с помощью мягкой ткани или губки, смоченной в мыльной воде. Не надавливайте и не трите.
6. Кожаменитель не любит чрезмерный нагрев, сухость или прямое попадание на него солнечных лучей.
7. Красящиеся текстильные материалы могут повлиять на кожаменитель светлых тонов.

ВНИМАНИЕ! Если у Вас не получается очистить собственными силами обивочный материал Вашей мебели, обратитесь в специализированные фирмы по химической чистке.

Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев

Во избежание недоразумений просим вас внимательно изучить инструкцию по сборке.

Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока эксплуатации.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:

- покупателем была предпринята попытка самостоятельного ремонта;
- обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией;

Гарантия не распространяется на крепёжные изделия и другие изделия, не предусмотренные в конструкции.

ПАСПОРТ

Руководство по сборке и эксплуатации

Кресло медицинское для лечебных учреждений KP12-B Кресло медицинское для лечебных учреждений KP12-B/П

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 32.50.30-004-34960786-2019

Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/14497 от 20.11.2023

Назначение и описание изделия

Кресло KP12-B и KP12-B/П на газ лифте предназначено для сидения.

Область применения – медицинские учреждения, производственные помещения, учебные помещения, лаборатории, лечебно-профилактические учреждения, социальные учреждения, офисы и другие помещения.

Каркас стальной с гальваническим покрытием, оснащён регулируемым по высоте кольцом – опорой для ног диаметром 450 мм. Основание – пятилучье на колесных опорах 50 мм, диаметр основания – 620 мм.

Механизм подъема – газ лифт, высота сиденья регулируется от 600 мм до 840 мм. Высота кресла – от 1000 мм до 1240 мм.

Сиденье и спинка обиты поролоном и обтянуты экокожей. Размер сиденья – 480х440 мм, размер спинки – 415х300 мм.

Кресло KP12-B/П комплектуется двумя подлокотниками из полиуретана. Размер подлокотника 220х90х30 мм. Высота от верха сиденья до верха подлокотника регулируется от 220 до 290 мм. Расстояние между подлокотниками 500 мм.

Вес изделия: KP12-B – 10 кг, KP12-B/П – 11 кг.

Упаковка кресла – картонная коробка. Габаритные размеры упаковки: 590х210х560 мм. Вес – 11 кг. Объем – 0,07 м³.

Подлокотники упаковываются отдельно. Размер упаковки: 130х150х300 мм. Вес – 2 кг. Объем – 0,006 м³.

Комплектация и инструкция по сборке

Изделие поставляется в разобранном виде.

Аккуратно распаковать изделие и все комплектующие.

Перед сборкой снять защитный колпачок с газ лифта.

Установить колёсные опоры (ролики) в основание каркаса до характерного «щелчка».

Модель может поставляться на неподвижных глайдерах – заглушках.




Крепежные изделия

- S1 – Винт М6х16 – 4 шт.
(крепление механизма)
S2 – Винт М6х45 – 2 шт.
(крепление спинки)
S3 – Винт М8х16 – 1 шт.
(крепление детали спинки)

Для КР12-В/П

- S4 – Винт М6х16 – 6 шт.
(крепление подлокотников)

Спинка

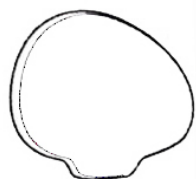


Сиденье



Крышка



Механизм

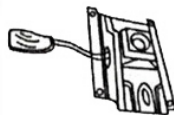

Основание



Колесо



X5

Газ лифт




Кольцо




Деталь спинки




1

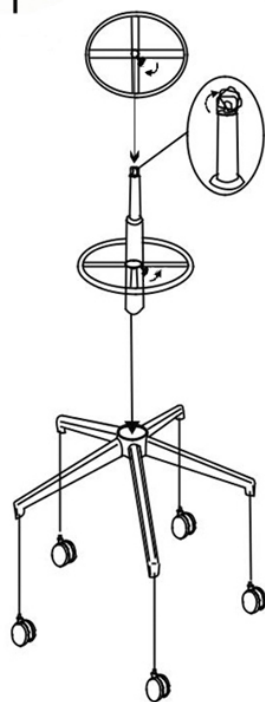


2

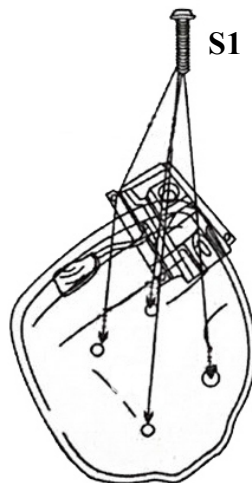

3

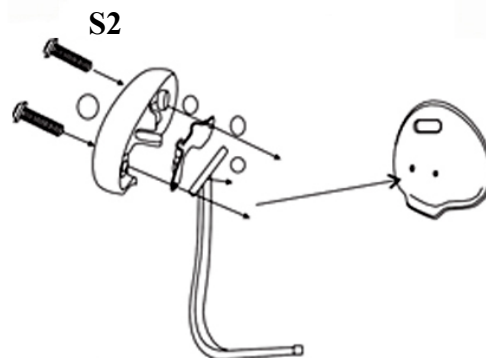

4

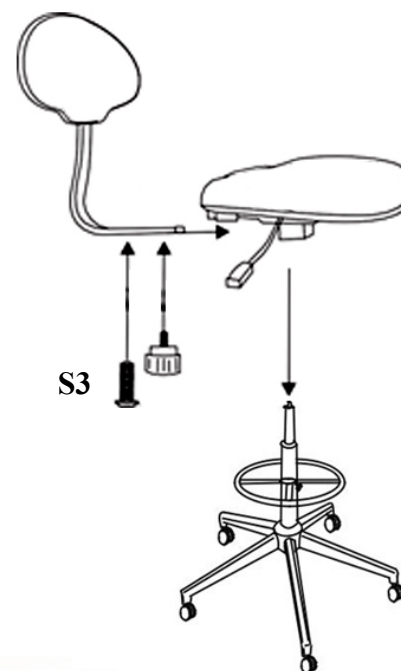

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижневартонск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Казань +7 (843) 207-19-05	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: inmedix.pro-solution.ru | эл. почта: inmedix@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70