

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80

Барнаул +7 (385) 237-96-76

Белгород +7 (472) 220-58-80

Владимир +7 (492) 249-51-33

Волгоград +7 (844) 245-94-42

Екатеринбург +7 (343) 302-14-75

Ижевск +7 (341) 220-90-75

Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (401) 272-21-36

Кемерово +7 (384) 221-56-70

Киров +7 (833) 220-58-70

Краснодар +7 (861) 238-86-59

Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45

Липецк +7 (474) 220-01-75

Москва +7 (499) 404-24-72

Набережные Челны +7 (855) 291-01-32

Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48

Омск +7 (381) 299-16-70

Оренбург +7 (353) 248-64-35

Пермь +7 (342) 233-81-65

Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Рязань +7 (491) 277-61-95

Самара +7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35

Смоленск +7 (481) 251-55-32

Ставрополь +7 (865) 257-76-63

Сургут +7 (346) 277-96-35

Тверь +7 (482) 239-50-56

Тула +7 (487) 244-05-30

Тюмень +7 (345) 256-94-75

Ульяновск +7 (842) 242-51-95

Уфа +7 (347) 258-82-65

Хабаровск +7 (421) 292-95-69

Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Челябинск +7 (351) 277-89-65

Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: inmedix.pro-solution.ru | эл. почта: inmedix@pro-solution.ru

телефон: **8 800 511 88 70**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Табурет лабораторный полиуретановый Т11-В



Табурет высокий лабораторный, с полиуретановым сиденьем, модель T11-B, на газ лифте и нароликах. Табурет предназначен для столов с высотой рабочей поверхности (столешницы) от 880 мм и выше. В базовом варианте поставляется на пластиковых колёсных опорах, с опорным кольцом для ног и с прямоугольным сиденьем с отверстием для руки

Документы: Регистрационное удостоверение на медицинское изделие № РЗН 2021/14497 от 26.02.2024 - скачать по этой ссылке Паспорт можноскачать по этой ссылке Вид медицинского изделия 260310 Код ОКПД2 - 32.50.30.119 (без НДС) Цвета табурета: Цвета сидений черный (круглое сиденье может быть черное, и за доплату серое и голубое) Цвет металлического каркаса: гальваническое покрытие

Техническое описание: Размеры могут отличаться на 5% Во избежание повреждений стойки каркаса на кольцо-опору для ног нельзя вставать. Опорное кольцо является подставкой для ног во время сидения (чтобы избежать затекания ног). Для регулировки кольца-опоры по высоте необходимо открутить фиксатор, выставить нужную высоту и зафиксировать кольцо, закрутив фиксатор на колёсных опорах высота от пола до верх сиденья меняется от 580 до 830 мм на глайдерах (заглушках) высота от пола до верха сиденья меняется от 555 до 805 мм разлёт (диаметр) опор 560 мм диаметр кольца для ног 400 мм - регулируется по высоте В базовом варианте табурет поставляется на пластиковых колёсных опорах. Дополнительная комплектация (за небольшую доплату): табурет может поставляться на неподвижных глайдерах - заглушках табурет может поставляться на колесных опорах, покрытых десмопаном (они лучше и долговечнее прорезиненных аналогов) Табурет может комплектоваться 3 видами полиуретановых сидений: прямоугольное с отверстием для руки (ширина 370 мм, глубина 350 мм, толщина 30 мм.) Цвет чёрный. прямоугольное со спинкой (ширина 340 мм, глубина 360 мм, толщина от 40 до 60 мм). Цвет чёрный круглое (диаметр 360 мм, толщина 40 мм - на сиденье есть удобное углубление). Цвет чёрный без доплаты. За доплату возможны "голубой" (PANTONE 292 C) и "серый" (PANTONE Cool Gray 3 C

Преимущества полиуретановых сидений: В отличие от фанеры и/или пластика пенополиуретан это упругий (мягкий) материал - на нем комфортно сидеть. удобно и быстро очищаются выдерживают обработку дезинфицирующими и моющими средствами обладают повышенной прочностью и износостойкостью нет никаких швов, стыков антивандальные комфортные- по сравнению с пластиком или фанерой полиуретан мягче негорючие - устойчивы к кратковременному воздействию температуры они устойчивы к воде, к летящим искрам, к кислотам и щелочам

Упаковка 1 штука/картонная коробка: Размер коробки 560*160*540 мм Объём коробки 0,048 м³. Вес коробки 7,7 кг. Инструкция по сборке: Аккуратно распаковать изделие и все комплектующие. Перед сборкой снять защитный колпачок с газ лифта. Прикрутить сиденье на 4 винта Установить колёсные опоры в основание каркаса, до характерного «щелчка» (с усилием)

Есть РУ.

Характеристики

Бренд	INMEDIX
-------	---------

Артикул	T11-B (круглое сиденье)
---------	-------------------------

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80

Барнаул +7 (385) 237-96-76

Белгород +7 (472) 220-58-80

Владимир +7 (492) 249-51-33

Волгоград +7 (844) 245-94-42

Екатеринбург +7 (343) 302-14-75

Ижевск +7 (341) 220-90-75

Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (401) 272-21-36

Кемерово +7 (384) 221-56-70

Киров +7 (833) 220-58-70

Краснодар +7 (861) 238-86-59

Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45

Липецк +7 (474) 220-01-75

Москва +7 (499) 404-24-72

Набережные Челны +7 (855) 291-01-32

Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48

Омск +7 (381) 299-16-70

Оренбург +7 (353) 248-64-35

Пермь +7 (342) 233-81-65

Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Рязань +7 (491) 277-61-95

Самара +7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35

Смоленск +7 (481) 251-55-32

Ставрополь +7 (865) 257-76-63

Сургут +7 (346) 277-96-35

Тверь +7 (482) 239-50-56

Тула +7 (487) 244-05-30

Тюмень +7 (345) 256-94-75

Ульяновск +7 (842) 242-51-95

Уфа +7 (347) 258-82-65

Хабаровск +7 (421) 292-95-69

Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Челябинск +7 (351) 277-89-65

Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: inmedix.pro-solution.ru | эл. почта: inmedix@pro-solution.ru

телефон: **8 800 511 88 70**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город