

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80

Барнаул +7 (385) 237-96-76

Белгород +7 (472) 220-58-80

Владимир +7 (492) 249-51-33

Волгоград +7 (844) 245-94-42

Екатеринбург +7 (343) 302-14-75

Ижевск +7 (341) 220-90-75

Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (401) 272-21-36

Кемерово +7 (384) 221-56-70

Киров +7 (833) 220-58-70

Краснодар +7 (861) 238-86-59

Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45

Липецк +7 (474) 220-01-75

Москва +7 (499) 404-24-72

Набережные Челны +7 (855) 291-01-32

Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48

Омск +7 (381) 299-16-70

Оренбург +7 (353) 248-64-35

Пермь +7 (342) 233-81-65

Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Рязань +7 (491) 277-61-95

Самара +7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35

Смоленск +7 (481) 251-55-32

Ставрополь +7 (865) 257-76-63

Сургут +7 (346) 277-96-35

Тверь +7 (482) 239-50-56

Тула +7 (487) 244-05-30

Тюмень +7 (345) 256-94-75

Ульяновск +7 (842) 242-51-95

Уфа +7 (347) 258-82-65

Хабаровск +7 (421) 292-95-69

Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Челябинск +7 (351) 277-89-65


Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: inmedix.pro-solution.ru | эл. почта: inmedix@pro-solution.ru

телефон: **8 800 511 88 70**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Табурет лабораторный с полиуретановым сиденьем Т10-В (прямоугольное со спинкой)

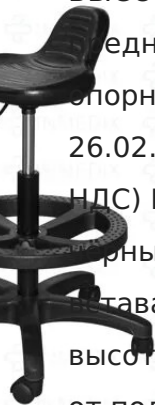

ВЫСОКИЙ лабораторный табурет, с пенополиуретановым сиденьем, модель T10-B, на газ лифте, на колёсных опорах (роликах). Табурет предназначен для столов с высотой рабочей поверхности(столешницы) от 880 мм и выше. В базовом варианте табурет поставляется с опорным кольцом для ног и с круглым сиденьем. Документы: Регистрационное удостоверение на медицинское изделие №РЗН 2021/14497 от 26.02.2024 - скачать по этой ссылке Паспорт можно скачать по этой ссылке Видмедицинского изделия 260310 Код ОКПД2 - 32.50.30.119 (без НДС) Цвета табурета: Цвета сидений черный (круглое сиденье может быть черное, и за доплату серое и голубое) Цвет пластикового каркаса - черный Техническое описание: Размеры могут отличаться на 5% Во избежание повреждений стойки каркаса на кольцо-опору для ног нельзя ставить. Опорное кольцо является подставкой для ног во время сидения (чтобы избежать затекания ног). Для регулировки кольца-опоры по высоте необходимо открутить фиксатор, выставить нужную высоту и зафиксировать кольцо, закрутив фиксатор на колёсных опорах высота от пола до верха сиденья меняется от 560 до 800 мм на глайдерах (заглушках) высота от пола до верха сиденья меняется от 535 до 775 мм Разлёт(диаметр) опор 600 мм Диаметр кольца для ног 460 мм В базовом варианте табурет поставляется на пластиковых колёсных опорах. Дополнительная комплектация (за небольшую доплату): табурет может поставляться на неподвижных глайдерах - заглушках табурет может поставляться на колёсных опорах, покрытых десмопаном (они лучше и долговечнее прорезиненных аналогов) Табурет может комплектоваться 3 видами полиуретановых сидений: прямоугольное с отверстием для руки (ширина 370 мм, глубина 350 мм, толщина 30 мм.) Цвет чёрный. прямоугольное со спинкой (ширина 340 мм, глубина 360 мм, толщина от 40 до 60 мм). Цвет чёрный круглое (диаметр 360 мм, толщина 40 мм - на сиденье есть удобное углубление). Цвет чёрный без доплаты. За доплату возможны "голубой"(PANTONE 292 C) и "серый" (PANTONE Cool Gray 3 C) Преимущества полиуретановых сидений: В отличие от фанеры и/или пластика пенополиуретан это упругий (мягкий) материал - на нем комфортно сидеть. Удобно и быстро очищаются выдерживают обработку дезинфицирующими средствами обладают повышенной прочностью и износостойкостью нет никаких швов, стыков антивандальные комфортные - по сравнению с пластиком или фанерой полиуретан мягче не горючие - устойчивы к кратковременному воздействию температуры они устойчивы к воде, к летящим искрам, к кислотам и щелочам Упаковка 1 штука/картонная коробка а: Размеры коробки 570мм * 580мм * 180мм. Объём коробки 0,06 м3. Вес упаковки 8 кг Инструкция по сборке: Аккуратно распаковать изделие и все комплектующие. Перед сборкой снять защитный колпачок с газ лифта. Прикрутить сиденье на 4 винта Установить колёсные опоры в основание каркаса, до характерного «щелчка» (с усилием)

Есть РУ.

Характеристики

Бренд	INMEDIX
-------	---------

Артикул	T10-B
Наши предложения	Новинка
В наличии	Да

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80

Барнаул +7 (385) 237-96-76

Белгород +7 (472) 220-58-80

Владимир +7 (492) 249-51-33

Волгоград +7 (844) 245-94-42

Екатеринбург +7 (343) 302-14-75

Ижевск +7 (341) 220-90-75

Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (401) 272-21-36

Кемерово +7 (384) 221-56-70

Киров +7 (833) 220-58-70

Краснодар +7 (861) 238-86-59

Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45

Липецк +7 (474) 220-01-75

Москва +7 (499) 404-24-72

Набережные Челны +7 (855) 291-01-32

Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48

Омск +7 (381) 299-16-70

Оренбург +7 (353) 248-64-35

Пермь +7 (342) 233-81-65

Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Рязань +7 (491) 277-61-95

Самара +7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35

Смоленск +7 (481) 251-55-32

Ставрополь +7 (865) 257-76-63

Сургут +7 (346) 277-96-35

Тверь +7 (482) 239-50-56

Тула +7 (487) 244-05-30

Тюмень +7 (345) 256-94-75

Ульяновск +7 (842) 242-51-95

Уфа +7 (347) 258-82-65

Хабаровск +7 (421) 292-95-69

Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Челябинск +7 (351) 277-89-65

Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: inmedix.pro-solution.ru | эл. почта: inmedix@pro-solution.ru

телефон: **8 800 511 88 70**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город